



Τμήμα Διάγνωσης

Προϊστάμενος Τμ. Διάγνωσης, Δρ Ανδρέας Φ. Μεντής, Βιοπαθολόγος
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αμπελόκηποι

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος τηλ: 2106478804-806

Δρ Μαρία Λινού, Κτηνίατρος τηλ.:2106478831, e-mail : linoum@pasteur.gr

Οδηγίες λήψεως, αποθήκευσης και μεταφοράς των δειγμάτων:

1. Η εξέταση των αντισωμάτων γίνεται με τον έλεγχο ορού ή πλάσματος αίματος. Η συλλογή του αίματος μπορεί να γίνεται σε κατάλληλα σωληνάρια και να σταλεί ο ορός (ή το πλάσμα) μετά από φυγοκέντρωση
2. Για τις μοριακές εξετάσεις απαιτείται ολικό αίμα, υλικό από λεμφαδένα, μυελό οστών, άλλο ιστό ή βλεφαρικό επιπεφυκότα
3. Τα δείγματα μεταφέρονται ιδανικά στους 4°C. Για αποθήκευση δειγμάτων (πέραν των 3 ημερών) συνιστάται η φύλαξή τους στους -20°C
4. ΠΡΟΣΟΧΗ μην καταψύχετε τα δείγματα αίματος πριν την φυγοκέντρωσή τους
5. Για τον βλεφαρικό επιπεφυκότα η λήψη γίνεται με βαμβακοφόρο στυλεό ο οποίος βυθίζεται σε 0,5ml φυσιολογικού ορού σε φιαλίδιο που κλείνει καλά για τη μεταφορά του

Χρόνοι παράδοσης απαντήσεων:

Οι απαντήσεις δίνονται συνήθως μεταξύ 2 έως 4 εργάσιμων ημερών.

Παράκληση για την τήρηση των οδηγιών λήψεως, αποθήκευσης και μεταφοράς των δειγμάτων.